



Bite to Perfection



ZAKK®

CE 0482

### Produttore:

R-dental Dentalmaterialien GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg • DE  
T +49 40-30707073-0 • F +49 40-30707073-73 • I www.r-dental.com

ZAKK®

REF ZKS2070

### Descrizione e indicazione

ZAKK® è un cemento provvisorio a base di ZnO non eugenolo a miscelazione automatica per la cementazione di corone e ponti provvisori e per la cementazione di prova di corone e ponti definitivi.

ZAKK® mostra un'eccellente adesione senza perdita di ritenzione ai restauri provvisori e allo stesso tempo un'ottima rimovibilità dai denti preparati.

Il non eugenolo ZAKK® non influisce sull'indurimento dei compositi a base di resina autopolimerizzati o a doppia polimerizzazione o dei materiali da cementazione per restauri definitivi.

ZAKK® è a base di zinco e acidi organici per una tenuta marginale ottimale.

Soprattutto in caso di allergie causate dall'eugenolo, l'uso di ZAKK® è fortemente consigliato.

ZAKK® soddisfa i requisiti della norma DIN EN ISO 3107 e della specifica ADA/ANSI n. 30.

### Procedure consigliate

#### 1. Preparazione della siringa a doppia camera da 5 ml (KwikkMix®)

Prima del primo utilizzo, avvitare il tappo originale e gettarlo. Prima di avvitare una nuova cannula di miscelazione, la siringa a doppia camera deve essere testata per verificare che entrambe le paste vengano estruse in modo uniforme. Quindi si inserisce la cannula di miscelazione e la si blocca ruotandola di 90° in senso orario.

ZAKK® verrà miscelato automaticamente utilizzando la CANNULA DI MISCELAZIONE FANTESTIC® MCN 2 (REF MIK1041) + FANTESTIC® INTRA-ORAL-TIP MCN 2 (REF IOT2041) del sistema di siringhe di sicurezza.

Al posto dell'INTRA-ORAL-TIP MCN 2 è disponibile una punta fine per l'applicazione del canale radicolare (ROOT-CANAL-TIP, REF RCT2041), con la quale è possibile applicare il materiale in modo diretto ed efficiente.

Inoltre, al posto della CANNULA DI MISCELAZIONE MCN 2 + INTRA-ORAL-TIP MCN 2 è disponibile una CANNULA DI MISCELAZIONE AD AGO (REF MIK1041N) con un ago di applicazione integrato e pieghevole.

Per questo tipo di siringa a doppia camera è disponibile una pistola di miscelazione per un'applicazione confortevole (REF MIP1041).

#### 2. Applicazione

Raccomandazione: Non asciugare completamente i monconi. Una superficie dentale leggermente umida permetterà di rimuovere più facilmente il restauro provvisorio.

Smaltire prima una piccola quantità di ZAKK® dopo l'estrusione. Introdurre ZAKK® in uno strato sottile e fine entro 90 s all'interno della corona e del ponte provvisori (tempo di lavoro a 73 °F) e posizionare il restauro con attenzione esercitando prima una leggera, ma poi decisa pressione sul dente e sulle aree preparate.

Il tempo di polimerizzazione intraorale è di circa 2-3 minuti. Il materiale in eccesso può essere rimosso facilmente con un ablatore.

Dopo la rimozione del restauro provvisorio, il cemento polimerizzato può essere facilmente separato dal dente.

#### Precauzioni per l'applicazione, la durata del prodotto e/o lo stoccaggio

Evitare il contatto di ZAKK® con i tessuti molli, la pelle o gli occhi. In caso di contatto accidentale, sciacquare immediatamente con molta acqua. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico.

Non utilizzare ZAKK® per pazienti con reazioni allergiche a questo materiale.

Prestare attenzione alle schede di sicurezza dei materiali (MSDS >> r-dental.com).

Prima del primo utilizzo, avvitare il tappo originale e smaltirlo. Prima di avvitare una nuova cannula di miscelazione, la siringa a doppia camera deve essere testata per verificare che entrambe le paste vengano estruse in modo uniforme.

Prima di ogni applicazione, una piccola quantità di materiale (di dimensioni simili a quelle del chicco di riso) deve essere pressata e smaltita immediatamente.

La CANNULA DI MISCELAZIONE riempita funge da sigillo fino all'applicazione successiva. Non riutilizzare il tappo della cartuccia.

Per la durata di conservazione vedere l'etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Non conservare a temperature superiori a 78 °F! Evitare l'esposizione alla luce solare.

La siringa a doppia camera deve essere conservata in posizione orizzontale.

ZAKK e KwikkMix sono marchi registrati di R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.

Tenere fuori dalla portata dei bambini!

**Attenzione:** Solo per uso dentale.

#### Garanzia

R-dental Dentalmaterialien GmbH garantisce che questo prodotto è privo di difetti di materiale e di lavorazione. R-dental Dentalmaterialien GmbH non si assume alcuna altra responsabilità, compresa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare. L'utente è responsabile dell'applicazione e dell'uso previsto del prodotto. Se si verificano danni al prodotto durante il periodo di garanzia, l'unico rimedio dell'utente e l'unico obbligo di R-dental Dentalmaterialien GmbH è la riparazione o la sostituzione del prodotto.

#### Limitazione di responsabilità

Nella misura in cui l'esclusione di responsabilità è consentita dalla legge, R-dental Dentalmaterialien GmbH non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno causato da questo prodotto, sia diretto, indiretto, speciale, incidentale o consequenziale, indipendentemente dalla teoria legale, compresa la garanzia, il contratto, la negligenza o il dolo.

© 2021 R-dental Dentalmaterialien GmbH. Tutti i diritti riservati.