

Gebruiksaanwijzing

Dutch - PUT1010XX-01/24



Bite to Perfection



R-SI-LINE® PUTTY



CE 0482

Fabrikant:

R-dental Dentalmaterialien GmbH · Winterhuder Weg 88 · 22085 Hamburg · DE
T 040-30707073-0 · E info@r-dental.com · I www.r-dental.com

REF PUT1010 (R-SI-LINE® PUTTY)

REF PUT1010FS (R-SI-LINE® PUTTY FS (fast set, snelle set))

Productbeschrijving

R-SI-LINE® PUTTY (- FS) wordt in de meeste gevallen gebruikt als voordruk materiaal voor de putty-wash-techniek (twee stappen) in combinatie met R-SI-LINE® correctie-afdrukmaterialen (bijvoorbeeld met R-SI-LINE® LIGHT SH (- FS) of R-SI-LINE® UltraLIGHT SH (- FS)).

R-SI-LINE® PUTTY (- FS) is een kneedbaar additiehhard afdruk materiaal op basis van vinylpolysiloxaan. Het is gemakkelijk te mengen en niet kleverig.

R-SI-LINE® PUTTY (- FS) voldoet aan de eisen van ISO 4823 Type 0 (putty met zeer hoge consistentie).

Indicaties/doel

R-SI-LINE® PUTTY (- FS) is geïndiceerd

- voor tweefasige corrigerende afdrukken (2-fase/2-fase) in combinatie met een correctief afdruk materiaal zoals R-SI-LINE® LIGHT SH (zie hierboven).

Prestatiekenmerken

De prestatiekenmerken van het product voldoen aan de eisen van het beoogde gebruik.

Contra-indicaties

Geen bekend.

Doelgroep patiënten

Mensen die worden behandeld als onderdeel van een tandheelkundige ingreep.

Beoogde gebruiker

Het medische hulpmiddel is bedoeld voor gebruik door professioneel opgeleide tandartsen.

Toepassing

1. Voorbereiding van de afdruklepel

Geperforeerde of ongeperforeerde metalen of plastic trays kunnen gebruikt worden. Om de hechting van de R-SI-LINE® PUTTY (- FS) op de tray te verbeteren, moet deze worden ingesmeerd met R-SI-LINE® SILICONE ADHESIVE (REF SIA1070) volgens de gebruiksaanwijzing. Laat de lijm 3 minuten drogen.

2. Dosering

Gebruik gelijke delen (volumelepels of gewicht) basispasta en katalysatorpasta (donkere lepels voor basispasta, witte lepels voor katalysatorpasta, niet verwisselen).

Kneed vervolgens beide pasta's minstens 30 s tot de kleur homogeen is.

Let op: Gebruik Base und Catalyst alleen met hetzelfde Chargen-No. Verwissel deksels van potten of lepels base en catalyst niet!

3. Voorbereidende afdruk

Het kant-en-klare gekneede materiaal wordt vervolgens in de geprepareerde afdruklepel geplaatst.

De geladen tray wordt binnen 1 min 30 s (werktijd bij 23 °C, voor snelhardend materiaal R-SI-LINE® PUTTY FS binnen 60 s, werktijd bij 23 °C) na het begin van het kneden in de mond geplaatst.

Houd de positie voor R-SI-LINE® PUTTY ten minste 3 min (het snelhardende materiaal R-SI-LINE® PUTTY FS ten minste 2 min) in de mond.

De voorlopige afdruk wordt voorzien van drainagegroeven voordat de corrigerende afdruk wordt gemaakt.

4. Putty-wastechniek in twee stappen

R-SI-LINE® PUTTY (- FS) kan direct na het uit de mond halen worden gebruikt met R-SI-LINE®-correctie-afdrukmaterialen (bijvoorbeeld met R-SI-LINE® LIGHT SH (- FS) of R-SI-LINE® UltraLIGHT SH (- FS)).

De informatie in de bijbehorende gebruiksaanwijzing moet in acht worden genomen.

De afdruk moet worden bewaard bij normale kamertemperatuur (max. 25 °C).

5. Gieten

De afdruk kan ten vroegste 30 minuten na verwijdering uit de mond worden gegoten. Er zijn geen andere tijdsbeperkingen.

6. Galvaniseren

Alle indrukken kunnen worden gegalvaniseerd met koper of zilver.

7. Desinfectie

De afdrukken kunnen worden gedesinfecteerd met desinfecterende oplossingen speciaal voor materialen op basis van additiehhardende siliconen. De gebruiksaanwijzing van de fabrikant moet in acht worden genomen.

8. Opslag

Niet opslaan boven 25 °C! Niet blootstellen aan zonlicht. Niet gebruiken na de vervaldatum.

Aanvullende informatie/waarschuwingen

Verwissel de deksels van de busen en de maatlepels niet!

Gebruik R-SI-LINE® PUTTY (- FS) niet met standaard siliconen afdrukmaterialen met condensatiereactie.

Gebruik geen handschoenen die latex of zwavel bevatten, omdat dit de uithardingsreactie van de polyvinyls kan beïnvloeden.

Buiten bereik van kinderen houden!

Verwijdering

Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

Meldingsplicht

Ernstige incidenten in overeenstemming met de EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen die zich hebben voorgedaan in verband met dit medische hulpmiddel, moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.

R-SI-LINE is een geregistreerd handelsmerk van R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.

Garantie

R-dental Dentalmaterialien GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. R-dental Dentalmaterialien GmbH aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid, met inbegrip van impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is verantwoordelijk voor de toepassing en het beoogde gebruik van het product. Als er binnen de garantieperiode schade aan het product ontstaat, is uw enige verhaalsmogelijkheid en de enige verplichting van R-dental Dentalmaterialien GmbH het product te repareren of te vervangen.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk is toegestaan, is R-dental Dentalmaterialien GmbH niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door dit product, hetzij direct, indirect, speciaal, incidenteel of gevolgschade, ongeacht de wettelijke theorie, met inbegrip van garantie, contract, nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

© 2024 R-dental Dentalmaterialien GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Vertaald door Dr. A. Sprafke, R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.