

Gebruiksaanwijzing

Dutch - ZKS2080-05/21



Bite to Perfection



ZAKK® Implant

CE 0482

Fabrikant:

R-dental Dentalmaterialien GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg • DE
T +49 40-30707073-0 • F +49 40-30707073-73 • I www.r-dental.com

ZAKK® Implant (Systeem 4:1)

REF ZKS2080

Beschrijving en indicatie

ZAKK® Implant is een zelfmengend, semipermanent bevestigingscementoort voor het cementeren van implantaatgedragen kronen en bruggen.

De zelfuithardende en lichtuithardende (dual-cure) ZAKK® Implant is gebaseerd op multifunctionele methacrylesters en bevat zinkoxide.

ZAKK® Implant vertoont een goed elastisch gedrag. ZAKK® Implant heeft goede afdichtingseigenschappen door een gecontroleerde lichte expansie.

Het niet-eugenol ZAKK® Implant heeft geen invloed op het uitharden van zelfuithardende - of duaaluithardende composieten op harsbasis of bevestigingsmaterialen voor definitieve restauraties.

Onverenigbaarheid met andere materialen

Gebruik ZAKK® Implant niet in combinatie met eugenolhoudende materialen. Eugenol belemmert de polymerisatie van het composiet. Bewaar ZAKK® Implant niet in de buurt van eugenolhoudende materialen. Ongepolymeriseerd ZAKK® Implant mag niet in contact komen met eugenolhoudende materialen.

Aanbevolen procedures

1. Voorbereiding van 5 ml spuit met dubbele kamer (KwikkMix®)

Schroef voor het eerste gebruik de originele dop eraf en gooi hem weg. Voordat je een nieuwe mengcanule aanbrengt, moet je testen of beide pasta's gelijkmatig worden geëxtrudeerd. Daarna wordt de mengcanule erop gezet en vastgezet door hem 90° met de klok mee te draaien.

ZAKK® Implant wordt automatisch gemengd met de FANTESTIC® MIXING CANNULA MPN 2 (Systeem 4:1) (REF MIK1046).

2. Toepassing

Let op: Voor het cementeren moeten het abutment en de binnenkant van de restauratie ontvet, gereinigd (bijv. met alcohol) en gedroogd worden.

Verwijder eerst een kleine hoeveelheid ZAKK® Implant na extruderen. Breng ZAKK® Implant als een fijne, dunne laag binnen 2 minuten aan op de binnenkant van de restauratie (werktijd bij 73 °F) en plaats het voorzichtig met eerst licht, maar vervolgens met stevige druk op de abutments.

Voor een snelle fixatie van de restauratie kan ZAKK® Implant voor 20 s worden uitgehard met licht in de marginale gebieden van elk oppervlak. In het geval van doorschijnende materialen is het ook mogelijk om ZAKK® Implant door het materiaal heen uit te harden met licht (gedurende 40 s van elk oppervlak).

ZAKK® Implant polymeriseert zonder lichtuitharding binnen 4 min. Daarna kan overtollig materiaal eenvoudig worden verwijderd met een scaler.

3. Verwijdering voor inspectie

Als de restauratie moet worden verwijderd voor inspectie, moet dit voorzichtig gebeuren met lichte maar permanente tractie.

Let op: Een schokkerige verwijdering moet worden vermeden!

Het resterende ZAKK® Implant cement kan bijna in één stuk worden verwijderd. Gebruik waterspray en afzuiging om alle resterende resten te verwijderen.

Het abutment en de restauratie worden vervolgens gereinigd en gedesinfecteerd met een wattenpellet gedrenkt in alcohol of een ander desinfecterend middel. Spoel daarna grondig af met water en droog af.

Nu kan de restauratie opnieuw worden vastgezet met ZAKK® Implant, zie hoofdstuk 2.

Voorzorgsmaatregelen voor toepassing, levensduur van het product en/of opslag

Vermijd contact van ZAKK® Implant met zachte weefsels, huid of ogen. Als er per ongeluk contact is, spoel dan onmiddellijk met veel water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als het per ongeluk wordt ingeslikt.

Gebruik ZAKK® Implant niet voor patiënten met allergische reacties tegen acrylaten.

Let op de veiligheidsinformatiebladen (MSDS >> r-dental.com).

Schroef voor het eerste gebruik de originele dop eraf en gooi hem weg. Voordat er een nieuwe mengcanule op de dubbelkamerspuit wordt geschroefd, moet worden getest of beide pasta's gelijkmatig worden geëxtrudeerd.

Voor elke toepassing moet een kleine hoeveelheid materiaal (zoals rijstkorrels) worden uitgeperst en onmiddellijk worden weggegooid.

De gevulde MIXING CANNULA werkt als een verzegeling tot de volgende toepassing. Gebruik de dop van het patroon niet opnieuw.

Houdbaarheid zie etiket. Niet gebruiken na de vervaldatum.

Niet bewaren boven 20 °C! Blootstelling aan zonlicht vermijden.

De dubbelkamerspuit moet horizontaal worden bewaard.

ZAKK en FANTESTIC zijn geregistreerde handelsmerken van R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.

Buiten bereik van kinderen bewaren!

Let op: Alleen voor tandheelkundig gebruik.

Garantie

R-dental Dentalmaterialien GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. R-dental Dentalmaterialien GmbH geeft geen andere garanties, waaronder impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor de toepassing van de gebruiker. Indien dit product binnen de garantieperiode defect raakt, bestaat uw enige verhaalsmogelijkheid en de enige verplichting van R-dental Dentalmaterialien GmbH uit reparatie of vervanging van het product.

Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij bij wet verboden, is R-dental Dentalmaterialien GmbH niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit dit product, hetzij direct, indirect, speciaal, incidenteel of gevolgschade, ongeacht de theorie die wordt aangevoerd, met inbegrip van garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

© 2021 R-dental Dentalmaterialien GmbH. Alle rechten voorbehouden.