

KwikkModel® GINGIVA SOFT

KwikkModel® GINGIVA HARD SCAN

Präzisionsmaterialien für Zahnfleischmasken



www.r-dental.com

Produktinformationen



Biß zur Perfektion

KwikkModel[®] GINGIVA

KwikkModel[®] GINGIVA SOFT

Einleitung

KwikkModel[®] GINGIVA[®] SOFT in Automix-Doppelkartuschen ist ein Präzisionsmodellmaterial auf Vinylpolysiloxanbasis (A-Silikon) zur direkten extraoralen Herstellung von abnehmbaren, flexiblen Zahnfleischmasken, abgestimmt sowohl für den Kronen- und Brückenbereich als auch für die Implantattechnik. Die fertige Zahnfleischmaske zeigt eine hochästhetische, natürliche Gingivafarbe. **KwikkModel[®] GINGIVA SOFT** kann direkt und blasenfrei appliziert werden. Es zeichnet sich durch eine feine Zeichnungsschärfe, Detailwiedergabe und hervorragende Dimensionsstabilität aus. Dadurch daß die natürlichen Gingivalverhältnisse naturgetreu nachgebildet werden können, wird es gern für zahntechnische Arbeiten im Bereich der Verblendtechnik empfohlen. Das Material läßt sich mit einem Skalpell ausgezeichnet bearbeiten, ist jedoch nicht für spanende Verarbeitung geeignet. **KwikkModel[®] GINGIVA SOFT** ist ausgeprägt thixotrop und kontrolliert im Fließverhalten, d. h. es bleibt in seiner Position stehen, fließt aber unter Druckeinwirkung. Es ist reißfest und hochelastisch und daher leicht abzunehmen und zu reponieren.

Die wichtigsten Leistungs-Parameter sind:

Leistungs-Parameter

| | |
|---|----------------|
| Mischzeit: | Automix |
| Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: | ca. 1 min 30 s |
| Zeit (Start Mischen bis Entnahme vom Gipsmodell): | ca. 8 min |
| Shore-A-Härte: | ca. 40 |

KwikkModel[®] GINGIVA HARD SCAN

Einleitung

KwikkModel[®] GINGIVA HARD SCAN in Automix-Doppelkartuschen ist ein universelles und scanbares Präzisionsmodellmaterial auf Vinylpolysiloxanbasis (A-Silikon) zur direkten extraoralen und ökonomischen Herstellung von abnehmbaren, flexiblen Zahnfleischmasken. Die Morphologie der Gingiva stellt in der Implantatprothetik bei der Herstellung von festsitzendem Zahnersatz bzw. Teilprothesen eine wichtige Informationsquelle dar, die zur Vermeidung von funktionellen und ästhetischen Problemen beiträgt. **KwikkModel[®] GINGIVA HARD SCAN** liefert dem Zahntechniker die zur Festlegung der Zervikalkonturen und der äußersten Präparationsgrenze erforderlichen Daten und kann dank seiner großen Zugfestigkeit leicht vom Gipsmodell abgenommen werden. Die hergestellte Zahnfleischmaske zeichnet sich durch eine feine Zeichnungsschärfe, Detailwiedergabe und hervorragende Dimensionsstabilität aus und ist für die puderfreie optische Erfassung von 3D-Daten ausgezeichnet auch in der Tiefe perfekt scanbar. **KwikkModel[®] GINGIVA HARD SCAN** findet seine primäre Empfehlung für alle zahntechnischen Scanarbeiten. Es ist vor allem sehr gut fräsbar.

Bei der Anfertigung des Zahnersatzes ist es mit **KwikkModel[®] GINGIVA HARD SCAN** möglich, den von der Zahnersatzkonstruktion ausgeübten Druck auf das Zahnfleisch des Patienten zu lokalisieren und erforderlichenfalls zu beseitigen.

Die wichtigsten Leistungs-Parameter sind:

Leistungs-Parameter

| | |
|---|----------------|
| Mischzeit: | Automix |
| Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: | ca. 1 min 30 s |
| Zeit (Start Mischen bis Entnahme vom Gipsmodell): | ca. 8 min |
| Shore-A-Härte: | ca. 69 |

Isolier- und Trennmittel

Isolier- und Trennmittel

Für die direkte Applikation der **KwikkModel[®] GINGIVA-A-Silikone** in den Vorwall aus Silikon empfehlen wir als Isoliermittel **KwikkModel[®] Anti-Bond-Spray**. Es verhindert eine chemische Reaktion der **GINGIVA-A-Silikone** mit dem Vorwallsilikon und läßt sich einfach hauchdünn sprayend aufbringen.

Bestellinformationen:

Bestellinformationen

| Bezeichnung: | Inhalt: | REF |
|---|-----------------------|---------|
| KwikkModel [®] GINGIVA SOFT | 2 DK à 50 ml + 12 MIK | KMG4000 |
| KwikkModel [®] GINGIVA HARD SCAN | 2 DK à 50 ml + 12 MIK | KMG0475 |
| KwikkModel [®] Anti-Bond-Spray | 1 Spraydose à 85 ml | KMA1010 |

* KwikkModel ist ein eingetragenes Warenzeichen der R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.
Produktänderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
© R-dental Dentalerzeugnisse GmbH 2021. Alle Rechte vorbehalten. V 01/2021.

Kontakt

Weitere Produkte, Informationen und R-dental-Hersteller-Katalog mit Preisen ([paper-app[®]](#)):
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg • Deutschland
T +49 (0)40-30707073-0 • F +49 (0)40-30707073-73 • E info@r-dental.com • I www.r-dental.com